


Bakri™
Postpartum Balloon

by

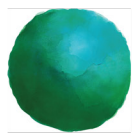

CooperSurgical®


Control de la hemorragia posparto



Una solución sencilla para la hemorragia posparto (HPP)

Consideraciones de tratamiento secuencial para el control conservador de la HPP resistente a los uterotónicos^{1, 2, 3}


4 Puntos Clave

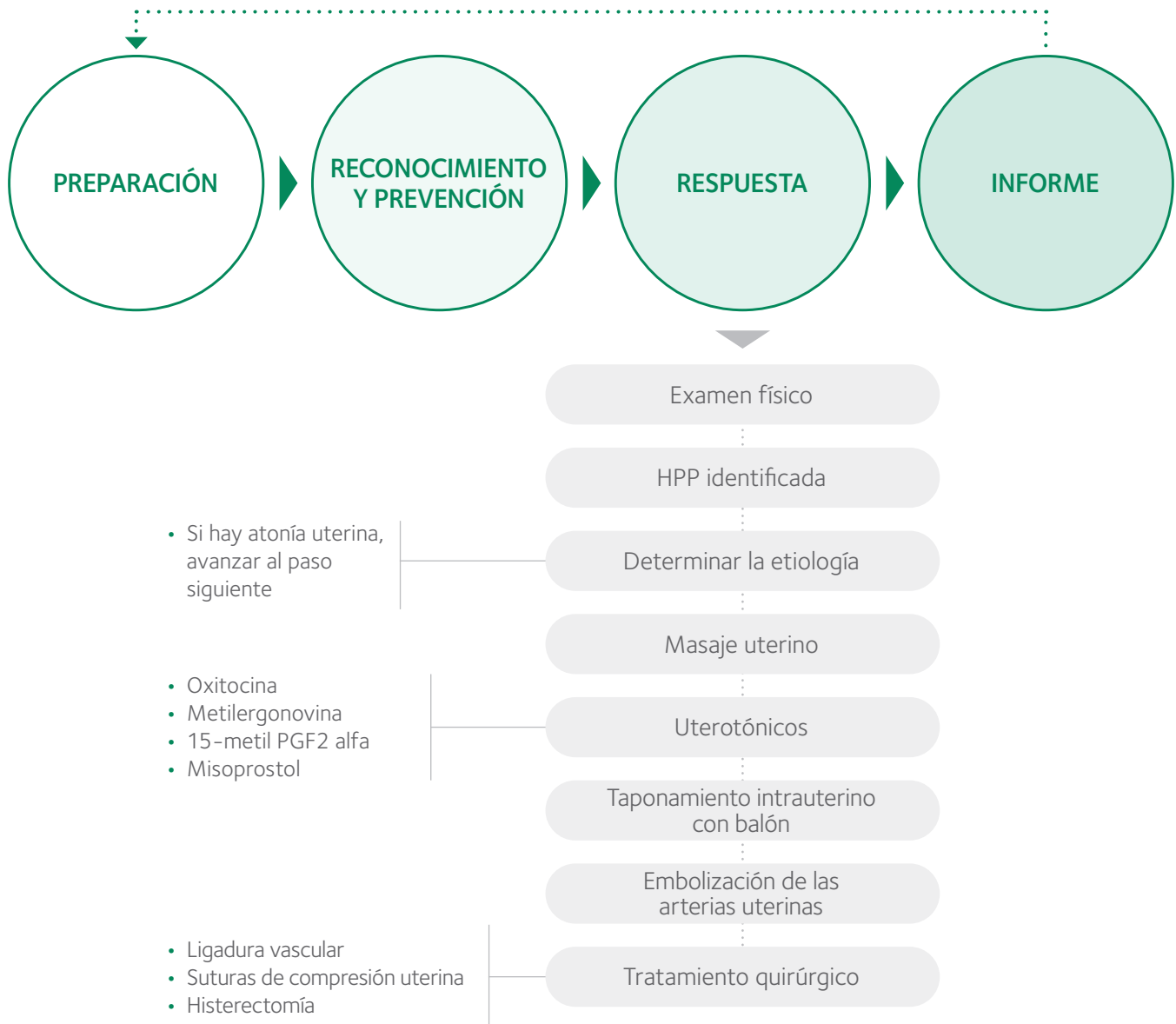

1. California Maternal Quality Care Collaborative (2014), Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format. Versión 2.0. Publicado en 2014. Consultado el 31 de agosto de 2016.

2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics (2017), "Practice Bulletin no. 183: Postpartum Hemorrhage", *Obstet Gynecol.*, 2017;130(4):e168-e186.


3. physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09.09-postpartum-hemorrhage.pdf (consultado el 29 de octubre de 2020).

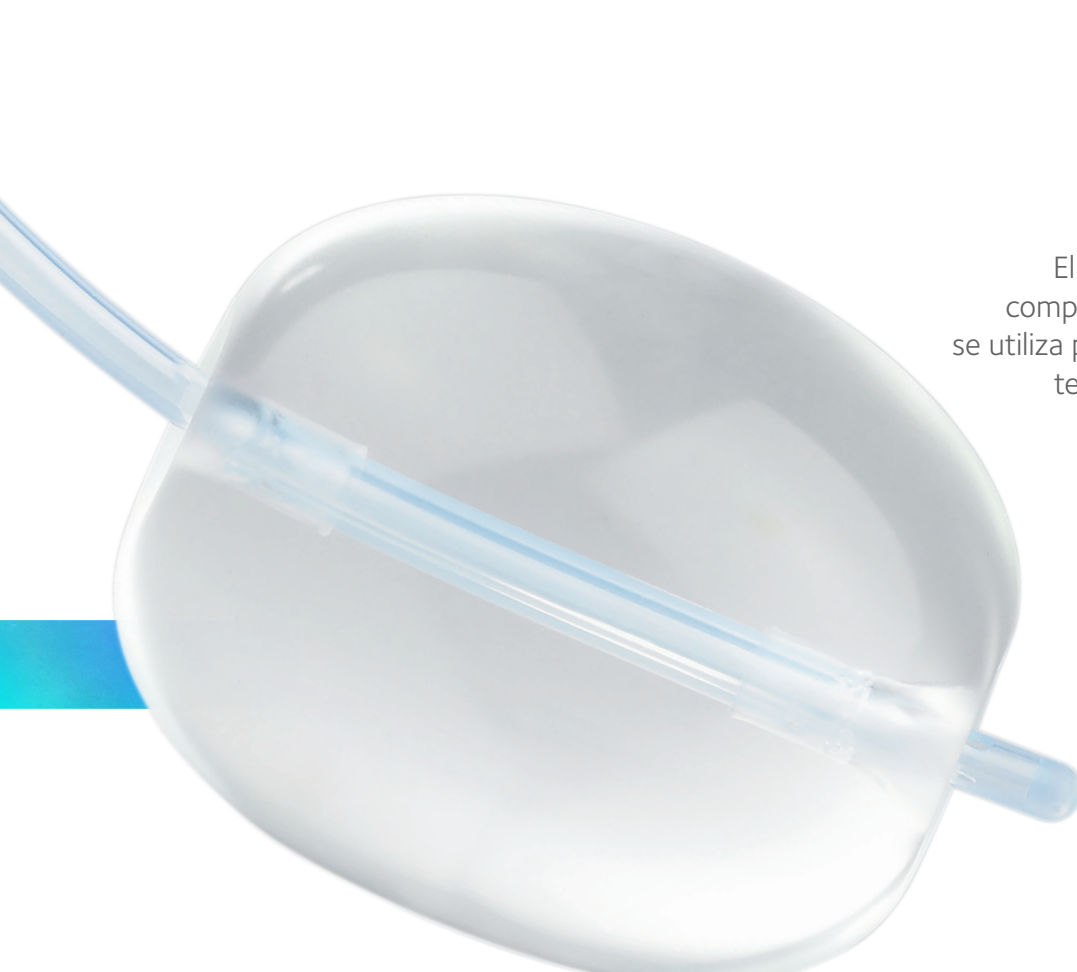

El balón posparto de Bakri con componentes de instilación rápida se utiliza para el control o la reducción temporal del sangrado uterino posparto cuando se justifica el manejo conservador.


Cuando se infla con líquido estéril, el balón posparto de Bakri con componentes de instilación rápida aplica presión sobre las paredes uterinas, lo que puede manejar la hemorragia posparto.

El balón y la sonda están fabricados 100 % de silicona.

- 
- Se puede utilizar después de un parto vaginal o por cesárea.
 - Incluye componentes de instilación rápida para facilitar el inflado del balón.
 - Se puede utilizar con suturas de compresión de B-Lynch si se justifica clínicamente.

Bakri™

Balón posparto con Componentes de Instilación Rápida

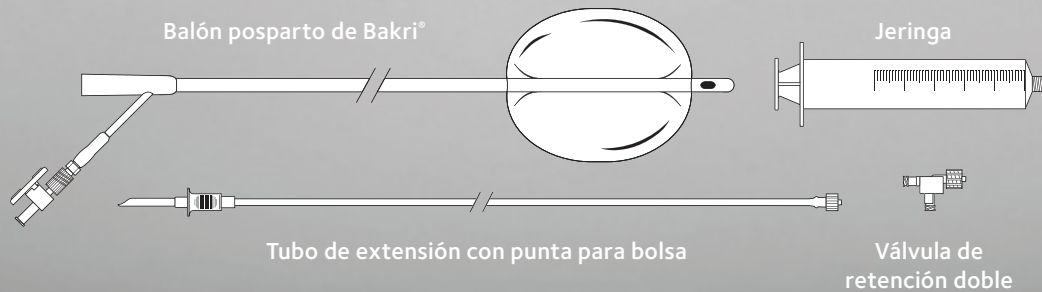

Información del pedido

NÚMERO	NRO. DE PIEZA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	SONDA	LONGITUD	VOLUMEN DEL BALÓN
G30673	J-SOS-100500	Balón de Bakri	24 Fr	54 cm	500 ml
G24237	J-SOSR-100500	Balón de Bakri con Componentes de Instilación Rápida	24 Fr	54 cm	500 ml

Comuníquese con un representante de ventas de CooperSurgical para obtener información adicional o realice el pedido directamente con el servicio al cliente de CooperSurgical al **+1 800.243.2974** | **+1 203.601.5200** | **www.coopersurgical.com**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

El balón posparto de Bakri® es un dispositivo de un solo uso, diseñado para proporcionar un control o una reducción temporal del sangrado uterino posparto cuando se justifica el manejo conservador.

CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de sangrado arterial que requiere exploración quirúrgica o embolización angiográfica; indicación de histerectomía; embarazo; cáncer de cuello uterino; infecciones purulentas en la vagina, el cuello uterino o el útero; anomalía uterina no tratada; coagulación intravascular diseminada (CID); o el sangrado ocurre en un sitio que el dispositivo no puede controlar de manera eficaz.

ADVERTENCIAS: El balón posparto de Bakri está indicado para utilizarse en caso de hemorragia posparto primaria dentro de las 24 horas posteriores al parto y no debe dejarse colocado durante más de 24 horas; se debe inflar con un líquido estéril hasta un punto de inflado máximo de 500 mL. No llene demasiado el balón ni utilice aire, dióxido de carbono ni ningún otro gas. Se debe vigilar con mucha atención a las pacientes para detectar señales de deterioro o de falta de mejora en su condición. Se debe controlar la producción de orina de las pacientes mientras el balón se encuentre en uso.

IMPORTANTE: Antes de colocar el balón, debe verificar que no queden fragmentos de placenta en el útero, y debe asegurarse de que no haya laceraciones ni traumatismos en el aparato genital y que el origen del sangrado no sea arterial.

Consulte las Instrucciones de uso antes de utilizar el balón posparto de Bakri, para obtener las instrucciones detalladas y conocer los posibles riesgos: <https://coopersurgical.com/bakri-ifu>

